


## 代理店/販売店 各位

2010年8月5日  
発行 No. HR-CA5-0022

HOYA 株式会社 ライフケア事業部  
医用機器SBU 品質保証部

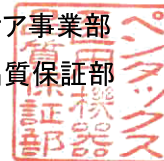

## バッテリー式内視鏡用光源装置 BS-LH1/LH2/LL1 に関するお知らせ

拝 啓

貴社ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

この度中国の病院におきまして、弊社製ハロゲン光源装置 BS-LH2 に装着されたリチウム電池が内視鏡検査施行中に破裂し、術者が熱傷を負うという事故が発生致しました。調査の結果、この医療施設では弊社が安全性を確認し、取扱説明書で指定したリチウム電池を使用していませんでした。

\* 弊社指定のリチウム電池は以下 3 種になります。

DURACELL DL123A , PANASONIC CR 123 A , SANYO CR123A

現法、営業所、代理店各位におかれましては、ハロゲン光源装置 (BS-LH1/BS-LH2/BS-LL1) をご愛用のお客様に、当該装置の取扱説明書にて指定のリチウム電池を必ずご使用頂くよう周知徹底をお願い致します。また、現在お客様が上記以外のものをご使用の場合は、直ちに交換して頂くよう重ねて徹底をお願い致します。

尚、弊社指定のリチウム電池は充電タイプではありません。充電タイプではないリチウム一次電池を充電すると、発火、爆発等の事故を引き起こす可能性がありますので、お客様への注意喚起をお願い申し上げます。また、社団法人電池工業会より電池の模造品や改造品に対する注意喚起文が出されておりますので、ご購入の際には十分にご注意下さいます様お願い申し上げます。

敬 具

この件に関しましてお問合せ頂く場合は、以下をお願い致します。

HOYA 株式会社 医用機器SBU 日本営業本部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-16-3 アーバンネット池袋ビル 13F

電話番号: (03) 5953 - 2590

FAX番号: (03) 5953 - 2594

以上